

Nocubi LS

Die neue Generation Anti-Dekubitus

Stand 09 2026

Nutzbare Verstellung des Pflegebettes:

- 1 Kopfteilverstellung möglich
- 2 Höhenverstellung möglich
- ⚠ 3 Verstellung des Fußteiles nicht möglich



Trendellenburg (falls vorhanden)



Symbol blinkt gelb
über 30°


Nocubi inaktiv

Wechseldruck nur **aktiv** bei
Kopfteil **unter 30°**.



Symbol blinkt gelb
bei 60°

Kopfteilerhöhung maximal 60°!
Bei Dauerwarnton Kopfteil tiefer
einstellen bis Warnton und Symbol aus.

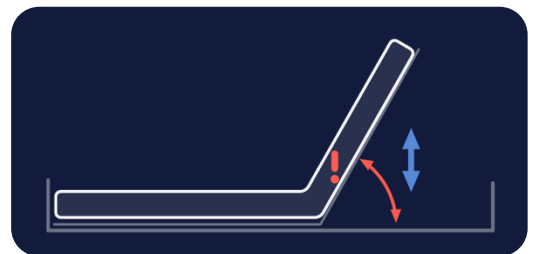

Topper auf Nocubi

Soft (50 - 70 kg)

Medium (70-110 kg)

Firm (110-150 kg)

☐
☐
☐

Geöffnet am

Haltbar bis

Kürzel