


Kurzanleitung



Kontrollleuchte grün = Betrieb
Korrektter Topper aufgelegt

Verstellung des Bettes

- 1 Kopfteilverstellung möglich
- 2 Höhenverstellung möglich
- 3 Verstellung des Fussteiles nicht möglich
- 4 Trendellenburg (falls vorhanden)

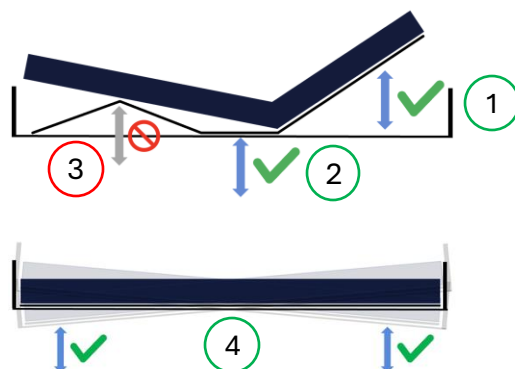

Kopfteilverstellung

Kopfteil über 30°



blinkt gelb über 30°



Wechseldruck aktiv unter 30°



Kopfteil über 60°




blinkt gelb + Warnton bei 60°



Kopfteilverstellung maximal 60°

Kopfteil sofort tiefer stellen bei Dauerwarnton



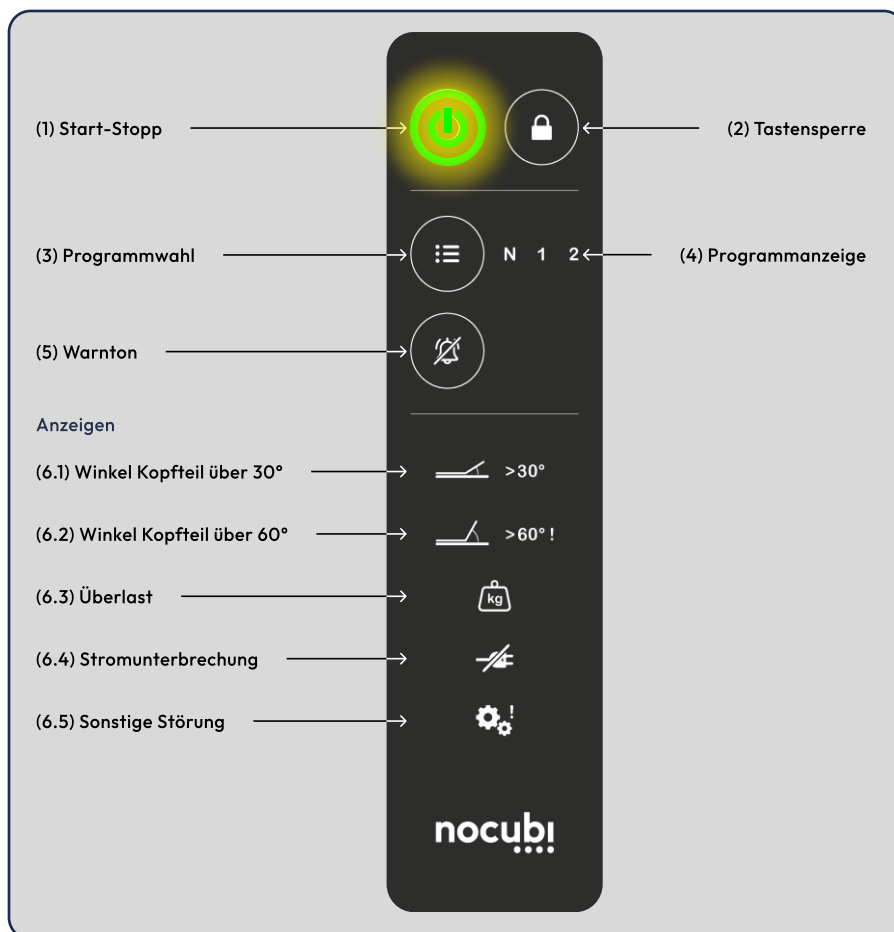

(1) Start-Stopp-Taste muss **grün** leuchten
 (3) Programmwahl

Warnsymbole

Überlast



Kein Strom



Sonstiger Fehler

